

Instructions pour connecter le Silver-Fit Mile à internet

Si vous connectez le SilverFit Mile à Internet via un câble ethernet, les applications en ligne peuvent être utilisées immédiatement.

Si vous connectez le SilverFit Mile au réseau WiFi, vous devez suivre les étapes suivantes.

Ouverture du panneau de configuration Internet:

Allumez l'ordinateur et attendez que le SilverFit Mile soit complètement lancé.

Ouvrez le panneau de configuration avec le bouton de menu situé dans le coin supérieur droit.



Cliquez sur « **Internet** » dans le menu. Vous verrez ici l'état actuel de la connexion au réseau.





Connexion au réseau:

Cliquez sur le bouton « Ouvrir les paramètres réseau ».





Sélectionnez le réseau Wi-Fi souhaité et entrez le mot de passe si nécessaire.

NB ! Ne vous connectez pas à des réseaux qui vous obligent à vous connecter avec des informations personnelles ou à un réseau d'entreprise où les données des patients sont stockées. Préférez la connexion via un réseau « invité ».





Retournez au programme SilverFit Mile en cliquant sur l'icône de la bicyclette en bas de l'écran.

Vous pouvez maintenant utiliser les fonctionnalités en ligne!



Vérifier l'état actuel de la connexion au réseau :

Allumez le système et attendez que le SilverFit Mile ait démarré. Ouvrez le menu dans le coin supérieur droit.



Cliquez sur « Internet » dans le menu. Vous pouvez y voir l'état actuel de la connexion au réseau. Si le système est déconnecté, cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'aide afin de vous connecter à l'internet.



