


Beste SilverFit Flow-klant,

Met trots presenteren wij je vandaag de software-update voor 2024 van de SilverFit Flow. In deze brief lees je welke functionaliteiten we hebben toegevoegd.

### 1. Instellingen aanpassen tijdens het spel

Het is nu mogelijk om de instellingen aan te passen gedurende de oefening. Als de instellingen te moeilijk of te gemakkelijk zijn voor die cliënt, kan dit eenvoudig worden gewijzigd zonder het spel te beëindigen. Door op de Pauze/Menu-knop in de oefening te klikken, wordt een klein instellingenmenu geopend. In dit menu kunnen flow- en volume instellingen worden aangepast. De aangepaste instellingen treden in werking vanaf de volgende herhaling. Wijzigingen in de instellingen worden weergegeven in de resultaten per herhaling en de instellingentabbladen nadat een oefening is voltooid.

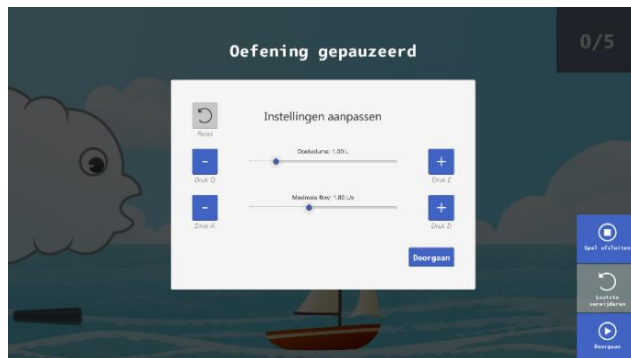

### 2. Minder kalibratiemomenten

In eerdere versies was het noodzakelijk om de sensor te kalibreren voordat een oefening of protocol kon beginnen. Kalibratie van de sensor is nu nog maar één keer nodig per sessie met het systeem. Dit zorgt ervoor dat er veel minder kalibratiemomenten zijn.

### 3. Beveiliging van cliëntgegevens aangescherpt

Privacyregels worden steeds belangrijker. Op de SilverFit Flow wordt informatie opgeslagen en voor veel organisaties (en cliënten) is het van groot belang dat dit zo veilig mogelijk gebeurt. Daarom hebben we extra beveiliging van gegevens in de database toegevoegd. We willen altijd voorkomen dat onbevoegden de opgeslagen cliëntgegevens kunnen inzien. In het dagelijks gebruik van de SilverFit Flow merk je hier niets van.

### 4. SilverFit voldoet aan nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen (MDR)

Achter de schermen is niet alleen gewerkt aan de nieuwe software-update maar hebben we ook gezorgd dat onze werkwijze aansluit bij de nieuwe wetgeving voor medische hulpmiddelen. Deze EU-wetgeving regelt een verbeterde cliëntveiligheid en klinische veiligheid van hulpmiddelen. De SilverFit Flow is geregistreerd met een UDI code in de Europese database voor medische hulpmiddelen.

*Heb je suggesties of ideeën?*

Wij zijn altijd benieuwd naar jouw ervaringen met de SilverFit Flow. Heb je suggesties of ideeën voor de SilverFit Flow? Vertel het ons! E-mail: [flow@silverfit.nl](mailto:flow@silverfit.nl) of telefoonnummer: +31 (0)348 769 110. Je bent ook van harte welkom op onze geaccrediteerde gebruikersbijeenkomsten en trainingen. Je vindt hiervan een overzicht op onze website: [evenementen.silverfit.nl](https://evenementen.silverfit.nl).

Met vriendelijke groet,

Team SilverFit